

OS disky – novinka pro aproximální stripping

Tento nový systém zajišťuje bezpečné a účinné odstranění ortodontického lepidla v mezizubním prostoru.



Speciální diamantové patentované disky s 60° úhlem se používají v oscilačním kolénkovém násadci KaVo s 30° výkyvem do stran. Díky tomu se minimalizuje riziko poškození měkkých tkání při používání kotoučků a není nutno používat ochranné krytky. Zároveň tyto disky zajišťují dobrou viditelnost a přehled při práci jak ve frontálním tak i v distálním úseku chrupu.



Kolénko lze používat s elektrickým (až 5.500 oscilací) i vzduchovým mikromotorem (až 3.000 oscilací)

Při práci dbejte na dostatečné chlazení a vedení disku směrem z okluzní k vestibulární oblasti.



Kotoučky jsou dodávány v různých zrněních medium a fine s barevným označením a různých tloušťkách 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.30 a 0.45mm jednostranně, nebo oboustranně sypané diamantem s poloměrem R 14 a R 11.

Pro jemné dokončení doporučujeme Compo systém pásky, diamantové separační pásky a kotoučky a následnou fluoridaci.

Cena : Kolénko OS30 + 4430 set: sada 4 kotoučků a kolénko 39545,- Kč

Jednotlivé kotoučky: 880,- Kč

The ASR starter set 4431 contains:

1x KaVo O-Drive

1x Set 4430 which includes:




- OS1M.000.140
Thickness: 0.30 mm
- OS1F.000.140
Thickness: 0.15 mm
- OS2M.000.140
Thickness: 0.45 mm
- OS2F.000.140
Thickness: 0.30 mm

German Patent DE 197 54 879



ASR starter set 4431

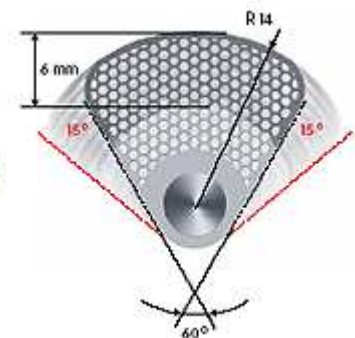

Dodává a servis zajišťuje :
Maxdent s.r.o.
ondracka@max-dent.cz

Obchodní zástupce:
Ondračka Martin, tel: 608 243 383